

# Kan Örneği Alım Talimatları



## Periferik Tam Kan


Lütfen sadece FoundationOne® Liquid Örnek Toplama ve Sevkiyat Kiti içinde sunulan tüpleri kullanın. Başka tüp kabul edilmeyecektir.

### Kullanım Talimatları

Doğru analiz için kan örneğinin doğru bir şekilde toplanması ve taşınması gerekmektedir.

Bu talimatlara uyulmaması, hücresiz DNA'nın lökosit lizisiyle ortaya çıkan DNA ile seyreltilmesine ve sonuçlarda yanlışlığa neden olabilir.

- 1 Sıvının berrak olduğunu, bulanıklık veya kristal içermediğini doğrulamak üzere FoundationOne Liquid kitleri içinde sunulan özel tüpleri kontrol edin.
- 2 Kan örneğinin alındığı tarih ve hastanın kimlik bilgilerini (hasta ismi, soyadı ve doğum tarihi) içeren etiketi doğru şekilde doldurup tüplerin üzerine yapıştırın.
- 3 İki tüp tam kan (her tüpte 8.5 ml) alın.
  - Geri akışı önleyin: tüpler kimyasal katkı maddeleri içermektedir ve kanın hastaya geri akışının önlenmesi önem taşımaktadır
  - Örneği CLSI H3-A6'ya<sup>1</sup> uygun olarak venipunktürle alın.
  - Tüpleri tamamen doldurun (her tüpte 8.5 mL)
- 4 Tüpü adaptörden çıkardıktan sonra her defasında terse döndürerek **YAVAŞÇA 8-10 kez çevirin**. Yetersiz veya geç sallama yanlış test sonuçları elde edilmesine neden olabilir. Aşağıdaki şekilde gösterilen terse döndürme hareketi; bileğin 180 derece çevrilmesi ve tekrar eski haline getirilmesidir. Yavaşça 8-10 kez yapılması gerekmektedir.

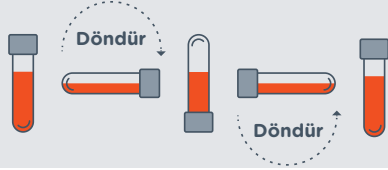

- 5 Kan örneğini ve test istem formunu (TRF) gerekli tüm bilgilerin (hastanın tanısı, evresi, numune alım tarihi gibi) uygun şekilde ve İngilizce doldurulduğundan emin olarak FoundationOne Liquid sevkiyat kitine koyun.
  - Her tüpe, kit içinde gelen etiketlerin, hasta isim soyadı, doğum tarihi ve numune alım tarihi doldurulmuş şekilde yapıştırıldığından emin olun.
- 6 Örnek alındıktan sonra mümkünse aynı gün içerisinde aşağıda yer alan sevkiyat talimatları doğrultusunda gönderimini yapın. Kan örneklerini **dondurmayın veya soğutmayın**.

Sıcaklık önemlidir. Örnekleri oda sıcaklığında (43-99°F, 6-37°C) saklayın.

### Sevkiyat Talimatları

1. Etiketlenmiş numune tüpleri sevkiyat kutusundaki straforunun içerisine yerleştirilir.
2. Numunelerin yerleştiği strafor, kutunun içinden çıkan üstünde bio-hazard yazılı poşete konularak sevkiyat kutusuna yerleştirilir.
3. Bu poşetin üstüne thermopack yerleştirilir ve kutu kapatılır.

4. Kan Örneği Alım Talimatları, Test İstem Formu, Fedex Gönderim Konşimentosu ve Fedex Poşeti numune kutusu ile birlikte aşağıdaki müşteri hizmetleri adresine kurye ya da kargo aracılığıyla gönderilir.

#### Müşteri Hizmetleri Adresi:

ECZACIBAŞI SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.  
Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok. No:5 Kat:6  
Levent/Şişli 34394 İstanbul

5. Herhangi bir sorunuz olması durumunda aşağıda yer alan iletişim bilgilerinden bize ulaşabilirsiniz.



infogenetik.com | f@ /infogenetik

☎ 0850 399 36 63

TR/FMI/1809/0029

#### Reference

1. Clinical and Laboratory Standards Institute. H3-A6, Procedures for the collection of diagnostic blood specimens by venipuncture; approved standard-sixth edition.